

na trhu od roku

87

Doporučili:

doc. MUDr. VI. Šícha, CSc.,

hlav. odb. MZ ČR pro obor stomatologie

a prof. MUDr. J. Vaško, DrSc.,

předn. klin. a vedoucích katedry I. stomatologické kliniky FN – Bratislava.



ZDARMA

Rázový odstraňovač zubních náhrad



na trhu
od roku 1987

Pracovní návod k použití – obsluze nástroje

Stlačením rukojeti nástroje se nastaví do pracovní polohy (rozsah 1 +3) úderník. Polohu úderníku je možno zaznamenávat i akusticky: při nastavení se ozve kovové cvaknutí. Hrot nástroje (výměnná koncovka) se pevně zachytí pod okrajem zubní korunky (náhrady). Pokud dojde během pracovní fáze k uvolnění přepětí ze strany obsluhy, ráz je neúčinný a postup je nutno zopakovat. Výhodné je nastavit nástroj nejprve na I. stupeň razance a aplikovat ráz na vestibulárním i orálním okraji korunky a pak teprve použít stupeň vyšší. Při rozsáhlejších náhradách je nutné postup opakovat na více místech náhrady. Vyzkoušení účinku nástroje, jeho funkce a nácvik práce (zejména zpočátku) je vhodné nejprve provést u volně nasazené nové protetické náhrady (bez adheziva) – tzv. na zákus. Po získání určitých zkušeností při práci s nástrojem je možné provádět snímání i rozsáhlých náhrad zcela spolehlivě. Nástroj je určen ke snímání pevných protetických náhrad všech typů (korunky, můstky klasické i mikroretenční) bez porušení jejich konstrukce. Výrobek a jeho použití doporučili mj. doc. MUDr. VI. Šícha, CSc., hlav. odb. MZ ČR pro obor stomatologie a prof. MUDr. J. Vaško, DrSc., předn. klin. a vedoucích katedry I. stomatologické kliniky FN – Bratislava.

Záruka 24
měsíců

Záruční
i pozáruční
servis

Made
in CZ

Cena: 2499,- + DPH



ČESKÝ VÝROBEK

Miroslav Kozák G&W
Dřevařská 12, 350 02 Cheb

tel. + fax: 354 424 243
e-mail: info@gwcheb.cz

 **optimo**
CONSULTING
www.ioptimo.cz